

Protocole d'utilisation

Mise en place de la lame

Fixation



- Éteindre la tondeuse.
- Positionner la tondeuse au-dessus de la lame.
- Faites glisser la tête de la tondeuse sur la lame.
- Un "clic" confirme la fixation correcte de la lame.

Retrait



- À l'aide du pouce, appuyer sur le bouton pour faire tomber la lame dans un container à déchets.
- **Pour éviter les contaminations croisées, utiliser une nouvelle lame pour chaque nouveau patient.**

Utilisation de la tondeuse chirurgicale 3M™



- Procéder par des mouvements courts et doux en inclinant la tondeuse de 15 à 30° par rapport à la surface cutanée et pousser la tondeuse délicatement vers l'avant.
- Tondre à rebrousse-poil pour de meilleurs résultats.
- Bien tendre la peau pour faciliter la tonte.
- Ne jamais appuyer de façon excessive. Ne pas tondre en tenant la lame perpendiculaire à la peau.

Comme confirmé lors de la conférence « Préparation cutanée de l'opéré: l'incontournable, le discutable, les perspectives » lors des journées de la S.F.H.H.** en juin 2007, l'intérêt de la tonte est de dépiler **sans provoquer de traumatisme cutané** et de **réduire le risque d'infection** du site opératoire. La nouvelle tondeuse Professionnelle 3M assure une tonte sans coupure ni écorchure, quels que soient le type de poil et la zone à tondre.

* 3M Science. Au service de la Vie.

** S.F.H.H. : Société Française d'Hygiène Hospitalière
MSD-00310 - Mars. 2020 - 3M est une marque déposée de 3M Company. Photos non contractuelles - Tous droits réservés
Dispositif Médical de classe I. Marquage CE. Lire attentivement la notice et les recommandations avant toute utilisation. 3M Deutschland GmbH, Allemagne.
Distribué par 3M France - Parvis de l'Innovation - CS20203 - 95006 Cergy-Pontoise Cedex - Tél. 01.30.31.61.61

Entretien

Rinçage



- Éteindre la tondeuse et retirer la lame.
- Immerger 15 min au maximum ou rincer la tondeuse sous l'eau courante avant désinfection.

Désinfection et séchage



- Appliquer une solution de désinfection à l'aide d'une compresse.
- La tondeuse chirurgicale peut également être immergée 15 min au maximum dans une solution désinfectante.
- Sécher avec une compresse.

S'assurer que la tondeuse soit parfaitement sèche avant de la recharger.

Recharge de la tondeuse

- Autonomie: jusqu'à 120 min de tonte environ.



- Cycle de charge: 4 heures.
- Laisser la tondeuse en charge entre les utilisations (pas de risque de surcharge). Les témoins lumineux sous le bouton indiquent le niveau de charge de la batterie. Lorsque le niveau de charge est faible, le voyant le plus bas clignote pour

indiquer qu'il faut recharger la batterie. Les voyants clignotent également lorsque la tondeuse est en charge.



Niveau de charge

- Vert 80-100 %
- Vert 60-80 %
- Vert 40-60 %
- Jaune 20-40 %
- Jaune 0-20 %

- La charge initiale est de 4 heures.