

## Tondeuse chirurgicale 3M™ Professionnelle à tête fixe référence 9681

Chargeur référence 9683

Lames à usage unique 9680



### Corps de la tondeuse et chargeur

- |  |   |
|--|---|
| ■ Dispositif médical de Classe 1, non stérile, sans fonction de mesurage |   |
| ■ Charge initiale  | <b>4 heures</b>                           |
| ■ Charges suivantes  | <b>4 heures</b>                           |
| ■ Autonomie de tonte   | <b>jusqu'à 120 min</b>                    |
| ■ Batterie   | <b>Lithium-Ion (Li-ion)</b>               |
| ■ Durée de vie   | 3 ans (500 cycles)                        |
| ■ Régime de coupe  | 5500 - 6000 oscillations / minute         |
| ■ Niveau sonore  | 73 dB                                     |
|  |   |
| ■ Poids de la tondeuse (avec lame)                                       | 180 g                                     |
| ■ Dimensions de la tondeuse (avec lame)                                  | <b>longueur 15,5 cm / diamètre 4,3 cm</b> |
| ■ Largeur de coupe   | <b>3,6 cm</b>                             |

Med-Surg-197 – Aout 2024

- |   |  |
|---|--|
| ■ Dents inférieures   | <b>35 dents</b>                                |
| ■ Dents supérieures (lame coupante)                                       | <b>28 dents</b>                                |
| ■ Garantie  | <b>2 ans à partir de la date d'acquisition</b> |
| ■ Lieu de fabrication   | Chine  |
| ■ Fabriqué par  | 3M Health Care, St Paul, USA                   |
| ■ Distribué par   | <b>3M Health Care, Neuss, Allemagne</b>        |
| ■ Marquage CE   |  |
| ■ Conforme aux exigences essentielles de la Directive Européenne 93/42CEE |  |

■ **ATTENTION : le numéro se trouvant au pied de la tondeuse ne correspond pas à la date de péremption mais au numéro de lot de fabrication**

### Mode d'emploi

- Bien sécher la peau
- Décoller les poils de la peau
- Tendre la peau pour les endroits difficiles d'accès (appareil génital)
- Tondre dans le sens contraire de la pousse du poil et en effectuant des mouvements légers et brefs
- Ne pas relever la lame pendant la manœuvre → Tire sur le poil
- Maintenir une légère inclinaison (15-30 degrés) entre la lame et la peau durant la tonte

### Indicateur de charge

- Les cinq voyants indiquent le niveau de charge de la batterie.
- Lorsque le niveau de la batterie est bas, le voyant clignote, indiquant que la tondeuse doit être rechargée.
- Les voyants clignotent lorsque la tondeuse est en cours de chargement.

### Entretien, stockage et élimination

- Tondeuse rinçable ou immergeable (maximum 15 min)
- Tondeuse et chargeur : nettoyer avec une solution désinfectante.
- S'assurer que la tondeuse est bien sèche avant de la replacer sur son socle-chargeur.
- Ne jamais stériliser le corps de la tondeuse quelle que soit la méthode.
- Conserver la tondeuse et son chargeur dans un local dépourvu d'humidité.
- Pour les appareils en fin de vie, contacter Récyllum, prestataire de 3M pour la collecte et le traitement des DEEE au 0 810 001 777 (numéro Azur).

### Caractéristiques électriques

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| ■ Tension du moteur       | 3,6 volts CC |
| ■ Intensité sans charge : | 1 A max      |

Med-Surg-197 – Aout 2024

Intensité à charge maximale :	1,3 A max
■ Circuit de charge	Alimentation 100-240V - CA 50-60Hz
 Élément appliqué de type BF	 Appareil de classe II - Double isolation

Conforme à la norme internationale IEC 60601-1 (2005) concernant les appareils électro médicaux.

### Conditionnement

■ Tondeuse chirurgicale à tête fixe 3M	<b>Réf - 9681</b> (1 par boîte)
■ Socle chargeur 3M pour tondeuse chirurgicale 3M	<b>Réf - 9683</b> (1 par boîte)
■ Lames à usage unique 3M pour tondeuse à tête fixe 3M	<b>Réf - 9680</b> (50 par boîte)

La tondeuse chirurgicale à tête fixe 3M réf. 9681 ne peut être utilisée qu'avec le socle-chargeur réf. 9683 et les lames à usage unique réf. 9680.

#### Avertissement

L'utilisation du produit décrit dans ce document suppose que l'utilisateur ait lu et compris la notice d'utilisation relative à ce produit.

Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur.

Le respect des informations et préconisations relatives aux produits ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe Solventum, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle.

Les conditions de garantie des produits fournis par le groupe Solventum sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

